

# QuickSleeper® 5



Anestesia immediata, eficaz e indolora.


**Dentalhitec**

Les stylos d'anesthésie  
qui changent la vie



# Anestesia osteocentral

## Brevemente

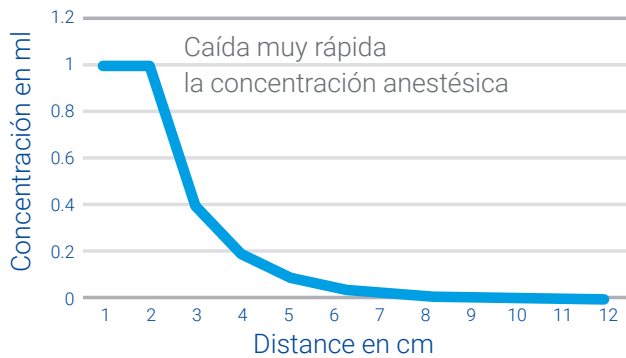

### Una técnica particularmente eficaz

"La solución anestésica se coloca lo más cerca posible del objetivo a alcanzar, que son los ápices. Sabemos que las fallas en la anestesia a menudo están relacionadas con demasiada distancia del objetivo de la inyección, lo que conduce a una dilución demasiado grande de solución anestésica y por lo tanto su ineficacia".

**Dr. P.Y. GREAUD** - Médico general, Brain (FRANCE)

*Le fil dentaire*

## ¡Una práctica eficiente!



La eficiencia se basa en un protocolo simple de 3 pasos:


1. Anestesia mucosa con inserción indolora.
2. Perforación ósea.
3. Inyección cerca de los ápices para mayor eficiencia inmediata.



## Optimice todas sus anestésicas sin necesidad de recuperación palatina y lingual

Estos datos se dan a título indicativo y varían según el vasoconstrictor, el paciente y su patología.

- Anestesia profunda:** pulpectomía, pulpotomía, tratamientos de conducto, extracción, descalcificación profunda, tratamientos múltiple, pulpitis.
- Anestesia semi-profunda:** tratamientos amelodentinarios.
- Cuidado del esmalte, descalcificación.**

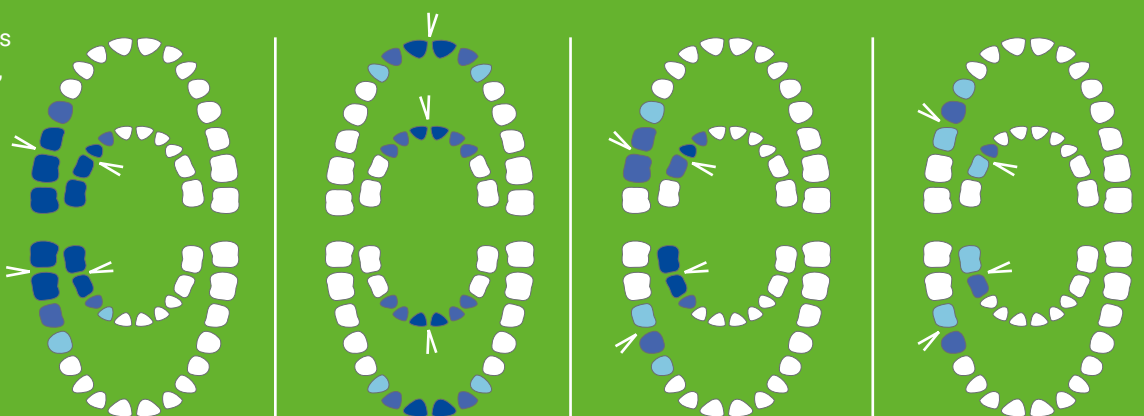

1

3/4


1/2

1/4

# ¿Por qué elegir la anestesia osteocentral con QuickSleeper?

Le seul système au monde qui permet d'injecter facilement l'anesthésique à proximité des apex.

- + Anestesia **inmediata, indolora y profunda**
- + Eficaz incluso en **molares mandibulares con pulpitis**
- + **Sin entumecimiento** innecesario de los tejidos blandos
- + **Control** de la cantidad requerida inyectada
- + **Hasta 6 dientes anestesiados** con una sola inyección
- + **Trabajar en varios sectores** en la misma sesión
- + **Facilita la organización** en tratamientos largos

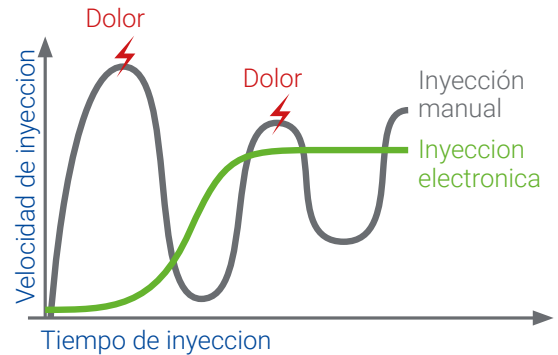

*El QuickSleeper está demostrando (...) ser una herramienta poderosa para los cirujanos dentales, en muchos sentidos, representa un progreso tangible en la práctica diaria.*

**Dr. D. GERDOLLE** - Odontología cosmética, Montreux (Suiza)



## QuickSleeper 5



Más información en [www.dentalhitec.com](http://www.dentalhitec.com)

# QuickSleeper<sup>5</sup>

## Soporte de 360°

- + **Fácil acceso** a todos los servicios (formación, dispositivo, vídeos,...).
- + **Una guía completa** para comenzar con QuickSleeper.
- + **Videos clínicos** por sector, para adultos y niños.
- + **¿Una pregunta clínica?** Un dentista experto en anestesia osteocentral te responde.



+ Acceso completo en **la bibliografía.**



*"El Quicksleeper es para mí una nueva forma de trabajar. Este instrumento ha reducido mi estrés ante las fallas y reducir significativamente la cantidad de anestésicos que inyecta.*

*De hecho, un caso de emergencia con pulpitis en un 6 mandibular se maneja fácilmente con un solo Cartucho de anestesia intraósea sin dolor y el reparto es inmediato, sin tiempo de espera. La mayoría de los pacientes me preguntan "¿dónde está la aguja y el pinchazo?", es un verdadero alivio para ellos, así como para mí.*

*Ahorro tiempo y es un consuelo para todos de mis acciones. También aprecian la pérdida de sensación del signo de Vincent.*

*El Quicksleeper será un consuelo para tus pacientes pero sobretodo para ti."*

**Dr A. SETTE**  
Médico general  
Morcenx-la-Nouvelle  
(40)



## Dentahitec

Les stylos d'anesthésie qui changent la vie

ZI de l'Appentière · 49280 Mazières-en-Mauges · FRANCE  
02 41 56 41 91 · mail@dentahitec.com



[www.dentahitec.com](http://www.dentahitec.com)

